

# EasyReader – návod na použitie skenera s hlasovým výstupom



**1** Zapnutie/ Vypnutie

**2** Hlasitosť

horné tlačidlo – hlasnejšie

dolné tlačidlo – tichšie

**Nastavenie jazyka** na rozpoznanie skenovaného textu

dlhšie držanie tlačidla **Hlasitosť** (buď horného alebo dolného)

Skener je nastavený na automatické rozpoznanie jazyka skenovaného textu.

Ak nastavenie zmeníte, po ukončení skenovania vráťte nastavenie do pôvodného stavu.

**3** Rýchlosť čítania

horné tlačidlo – rýchlejšie

dolné tlačidlo – pomalšie

**4** Skenovanie

**5** Čítanie naskenovaného textu

horné a dolné tlačidlo – prepínanie režimov čítania

po písmenách, po slovách, po vetách, po riadkoch, po blokoch, po stranách

stredné tlačidlo

spustiť/ pozastaviť čítanie

pravé tlačidlo

pokračovať ďalej v čítaní

ľavé tlačidlo

vrátiť sa naspäť v čítaní

**6** Zapojenie slúchadiel Prosíme, slúchadlá neodpájať.

pokračovanie na  
ďalšej strane





## 7 Uloženie naskenovaného dokumentu

Po zasunutí USB kľúča počkajte na hlasové pokyny zo skenera.

Naskenovaný dokument sa uloží v troch formátoch:

- textový súbor
- obrázok
- zvuková nahrávka MP3

Po uložení naskenovaného dokumentu počkajte na hlasový pokyn zo skenera na vytiahnutie USB kľúča.

### **Upozornenie**

Ak skenujete viac dokumentov v rôznych jazykoch, ukladajte ich jednotlivo. Napríklad: najprv naskenujete slovenský text a ten uložíte (vložíte USB a po uložení ho vytiahnete). Potom nastavíte jazyk na angličtinu a naskenujete anglický text, ktorý samostatne uložíte (znovu vložíte USB a po uložení vytiahnete). Dokumenty budú uložené v samostatných priečkach.